

BENUTZERINFORMATION

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESEN GESICHTSSCHUTZ VERWENDEN.

Anwendbar auf Produkte:	1145 1146	Gesichtsschutz-Set Ersatzschilder
Hersteller:	Premium Plus (Dongguan) Limited No. 1 Industrial Area, Tutang, Changping, Dongguan, Guangdong, People's Republic of China	
Benannte Stelle der EU:	Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).	
Zugelassene Stelle der Großbritannien:	Module B and C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321).	
Konformitätserklärung:	www.premiumplushk.com	

Diese Produkte sind als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in der in das britische Recht übernommenen und geänderten Fassung eingestuft und erfüllen nachweislich die Anforderungen dieser Verordnung, indem sie in begrenztem Umfang anhand der harmonisierten europäischen Norm und der designierten Norm EN 166:2001 (siehe unten) geprüft wurden.

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es einen gewissen Schutz gegen den Kontakt mit Tröpfchen in der Luft bietet, die eine biologische Gefahr darstellen können. **Denken Sie jedoch immer daran, dass keine PSA einen vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Ausübung der risikobehafteten Tätigkeit stets Vorsicht geboten ist. Verwenden Sie dieses Visier niemals zum Schutz vor anderen Gefahren, für die das Produkt nicht ausgelegt oder getestet ist.**

LEISTUNG UND ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN – Diese Produkte wurden in Übereinstimmung mit EN 166 getestet: 2001 Abschnitte: 6 | Design; 7.1.1 | Sichtfeld; 7.1.2.1 | Brechkraft; 7.1.2.2 | Lichtdurchlässigkeit; 7.1.2.3 | Lichtstreuung; 7.1.3 | Qualität der Materialien; 7.1.4.2 | Erhöhte Robustheit; 7.1.5.1 | Stabilität bei erhöhter Temperatur; 7.1.7 | Widerstandsfähigkeit gegen Entzündung; 7.2.4 | Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten

GEBRAUCHSANWEISUNG –

Zum persönlichen Schutz gegen Tropfen und Spritzer

1. Vor dem Zusammenbau die Schutzfolie von beiden Seiten der großen und kleinen Schutzfolie abziehen.
2. Befestigen Sie das größere Schild mit Hilfe der Befestigungsglaschen im Visierahmen am Rahmen.
3. Schieben Sie das kleinere Schild mit der runden Seite nach unten durch die Öffnung in der Spitze des Visierrahmens. Verwenden Sie die Rillen, um das Schild am Visierahmen zu befestigen.
4. Setzen Sie den Gesichtsschutz auf den Kopf und stellen Sie die Zugschnur so ein, dass es sicher sitzt.

Zur Wiederverwendung lesen Sie bitte den Abschnitt **"REINIGUNG"** weiter unten.

ANPASSUNG UND GRÖSSENBESTIMMUNG – Diese Produkte haben eine Einheitsgröße. Tragen Sie nur Produkte in der passenden Größe, die richtig eingestellt sind. Zu locker sitzende Produkte bleiben möglicherweise nicht an Ort und Stelle, und zu eng sitzende Produkte sind unbequem. Zum An- und Ausziehen der Produkte:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1145/
1146 | 1. Setzen Sie den Kopf auf und stellen Sie den Kordelzug für einen sicheren Sitz ein. |
|-----------------------|---|

KOMPATIBILITÄT – Um den Schutz zu optimieren, müssen diese Produkte mit geeigneten Handschuhen/Kleidern/Masken verwendet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall vor der Durchführung der risikobehafteten Tätigkeit an Ihren Lieferanten oder Vorgesetzten, um sicherzustellen, dass alle Ihre Schutzprodukte kompatibel und für Ihre Anwendung geeignet sind. Warnung - Teile des Visiers, die mit Ihrer Haut in Berührung kommen, können zu allergischen Reaktionen führen. In diesem Fall stellen Sie bitte die Verwendung ein und suchen Sie einen Arzt auf.

LAGERUNG UND TRANSPORT – Wenn Sie das Visier nicht benutzen, lagern Sie es an einem gut belüfteten Ort und schützen Sie es vor extremen Temperaturen. Legen Sie niemals schwere Gegenstände darauf ab. Vermeiden Sie nach Möglichkeit übermäßiges Falten, legen Sie das Visier nicht mit der Vorderseite nach unten auf Oberflächen und lagern Sie es vorzugsweise senkrecht hängend. Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es einlagern. An einem dunklen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

HALTBARKEIT – Dieses Visier hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Die Lebensdauer hängt von den Einsatzbedingungen ab, aber das Visier soll entsorgt und ersetzt werden, wenn es stark zerkratzt oder in einer Weise beschädigt ist, die eine sichere Verwendung verhindert.

REPARATUR – Wenn das Visier oder der Rahmen beschädigt wird, bietet es NICHT den optimalen Schutz und soll daher sofort ersetzt werden. Ersatzschilder Produktcode 1146. Verwenden Sie niemals beschädigtes Produkt..

REINIGUNG – Verwenden Sie nur die folgenden empfohlenen Reinigungsverfahren.

1. Bauen Sie die Schutzschilder vom Rahmen ab.
2. Spülen Sie starke Verschmutzungen von den Komponenten ab.
3. Verwenden Sie einen 2-in-1-Oberflächenreiniger oder ein Wischtuch zur Reinigung und Desinfektion aller Komponenten. Verwenden Sie NIEMALS lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten gründlich mit dem Desinfektionsmittel abgewischt werden.
5. Wischen Sie nach der Reinigung überschüssiges Desinfektionsmittel ab und trocknen Sie die Komponenten mit einem sauberen Papierhandtuch oder Mikrofaser Tuch.

Premium Plus (Dongguan) Ltd.				
Aktenzeichen:	Dateibezeichnung:	Produkt:	Version:	Seite:
TF-PPE-02k_DE	Benutzerinformation	Wiederverwendbarer Gesichtsschutz	V1.0 (EN V2.3)	1 von 1